


# Reusable NIBP Comfort Cuffs

*Instructions for Use*

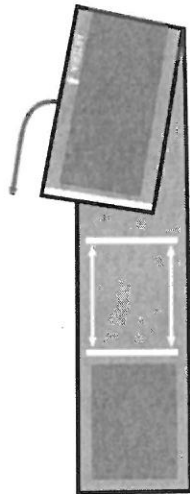

REF M1571A 10-15cm	REF M1572A 14-21.5cm
REF M1573A 20.5-28cm	REF M1574A 27-35cm
REF M1575A 34-43cm	REF M1576A 42-54cm

# PHILIPS

---

## Ostrzeżenia

- Po podłączeniu do automatycznego monitora ciśnienia bez funkcji alarmów powiadamiającej o nieudanym odczycie mankiet stosować wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem przeszkolonego personelu medycznego.
- Produkt ten jest przeznaczony wyłącznie do stosowania z urządzeniami pomiarowymi Philips pod warunkiem, że został wymieniony na liście akcesoriów w dokumentacji konkretnego urządzenia.
- Płyn w przewodzie lub worku mankieta spowoduje uszkodzenie sprzętu monitorującego. Przed czyszczeniem należy założyć zatyczkę (numer katalogowy: 9898 031 51601) na złączu, aby zapobiec przedostaniu się płynu do przewodu. Nigdy nie należy zanurzać worka lub przewodu w żadnym płynie.

---

## Wymiana mankieta

Wymiany wymaga mankiet uszkodzony, zatkany lub noszący widoczne ślady zabrudzenia. Mankiet należy wymienić, jeśli na monitorze wyświetlany jest komunikat o wykryciu nieszczelności.

---

## Definicje symboli na produkcie



Obwód kończyny



Właściwe zakładanie  
mankietu




Niewłaściwe zakładanie  
mankietu

---

## Instrukcje

1. Załóż otwarty mankiet na ramię (lub udo), tak aby strona z logo Philips *nie* dotykała skóry pacjenta. Ustaw strzałkę (▼) z napisem **ARTERIA** w miejscu położenia tętnicy ramiennej (udowej).
2. Owiń ciasno mankiet wokół ramienia lub uda (patrz poniżej).

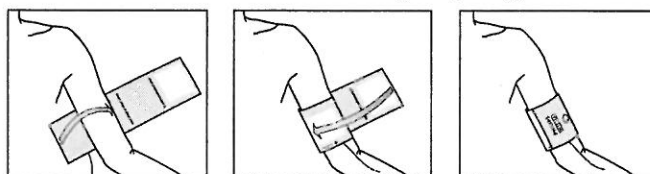

3. Sprawdź, czy biała linia na końcu mankietu umiejscowiona najbliżej przewodów mieści się w zakresie linii rozmiaru (| |) nadrukowanych po wewnętrznej stronie mankietu. Jeśli nie, wybierz mankiet lepiej dopasowany do obwodu kończyny.

---

## Czyszczenie i dezynfekcja

Mankiety należy wycierać roztworem łagodnego mydła i wody. Jeśli pokrowiec wymaga dokładniejszego mycia, najpierw należy wyjąć z niego worek. Przed następnym użyciem należy odczekać, aż pokrowiec całkowicie wyschnie.

Mankiety zostały sprawdzone i są odporne na czyszczenie poniższymi zalecanymi środkami odkażającymi: Cidex, Sporidyn, Microzid, 70% alkohol izopropylowy, 70% alkohol etylowy, Buraton.

---

## Sterylizacja

Mankiety zostały sprawdzone i są odporne na steryлизację tlenkiem etylenu (EtO). Należy przestrzegać wszystkich środków ostrożności dotyczących napowietrzania po sterylizacji EtO. *Mankiety nie nadają się do sterylizacji w autoklawie.*