



BUDOWA OPATRUNKU

Warstwy stabilizowane są przeszyciami z nylonu i elastanu, które zapewniają rozciągliwość i elastyczność.



Przyjazny dla skóry hydrokoloid



Warstwa kontaktowa zbudowana z nietkanych włókien karboksymetylocelulozy sodowej (Technologia Hydrofiber[™])

Wodoodporna błona poliuretanowa o dużej chłonności

Postać produktu:

Sterylny opatrunek przylepny

DZIAŁANIE:

- Wysoce chłonna warstwa centralna, dzięki zaawansowanej Technologii Hydrofiber[™] wchłania i zatrzymuje w strukturze opatrunku surowiczo-krwisty wysięk wraz ze szkodliwymi komponentami. Przekształca go w miękki żel, który utrzymuje wilgotne środowisko sprzyjające gojeniu rany, dopasowuje się do dna rany, a dzięki wchłanianiu pionowemu zapobiega maceracji skóry wokół rany.
- Część hydrokoloidowa opatrunku zapewnia ochronę skóry, jest przylepna i przyjazna dla skóry oraz pozwala na bezbolesne zdejmowanie opatrunku, zmniejszając tym samym ryzyko uszkodzenia zdrowej skóry wokół rany.
- Opatrunek jest wodoodporny - zewnętrzna błona poliuretanowa stanowi barierę dla wirusów i bakterii z zewnątrz zmniejszając ryzyko infekcji (także zakażeń krzyżowych). Zapewnia integralność opatrunku oraz zapobiega przeciekaniu. Jest półprzezroczysta, dzięki czemu łatwo można kontrolować warstwę chłonną bez zdejmowania opatrunku.
- Dodatkowe przeszycia włóknami nylonu i elastanu – zapewniają zwiększoną rozciągliwość i elastyczność, dzięki temu opatrunek idealnie dopasowuje się do kształtu rany/cięcia, zapewnia właściwe przyleganie podczas ruchu ciała i obrzęku pooperacyjnego (możliwa szybka rehabilitacja i łatwa higiena).
- Zmniejsza dyskomfort związany z częstą zmianą opatrunków i minimalizuje ból podczas noszenia oraz usuwania opatrunku.

WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA:

Rany gojące się przez rychłozrost, np.:

- rany pourazowe;
- rany po planowanych zabiegach operacyjnych/cięciach chirurgicznych.

WARTO WIEDZIEĆ:

- Aby prawidłowo założyć opatrunek na ranę na kolanie, kolano powinno być ułożone pod kątem 30 stopni.
- Aby zdjąć opatrunek, trzeba delikatnie ucisnąć skórę z opatrunkiem jedną ręką i ostrożnie podnieść krawędź opatrunku drugą ręką. Następnie należy delikatnie rozciągnąć opatrunek, aby utracił przyleganie do skóry i zdjąć go.

Czas pozostawiania na ranie:

Maksymalnie do 7 dni, ale zawsze jest to uzależnione od obrazu klinicznego i ilości wysięku.

AQUACEL[®] Surgical

Dostępne rozmiary	Długość rany operacyjnej	Nr katalogowy	Liczba sztuk w opak.
9x10 cm	4 cm	412017	10
9x15 cm	9 cm	412018	10
9x25 cm	17 cm	412019	10
9x35 cm	27 cm	412020	10

