

## Manualne czyszczenie i dezynfekcja

# ORANGE SOLVENT

Specjalny środek czyszczący do czyszczenia powierzchni wyrobów medycznych

- Z naturalnego olejku pomarańczowego
- Z dodatkową mocą czyszczenia
- Bez wysiłku usuwa wszelkiego rodzaju pozostałości

### Opis produktu

**ORANGE SOLVENT** to gotowy do użycia roztwór czyszczący do dokładnego usuwania pozostałości alginianu i cementu, a także drobinek tlenku cynku / eugenolu z instrumentów i sprzętu medycznego i stomatologicznego. Również do usuwania resztek kleju, markerów permanentnych i zadrapań z podłóg. Nawet szczególnie uporczywe plamy można usunąć za pomocą **ORANGE SOLVENT**. Ekonomiczny w użyciu.

### Zakres stosowania

Łatwe usuwanie uporczywych naklejek i starych etykiet po krótkim czasie aplikacji oraz łatwe usuwanie resztek kleju.

- Do znacznego usuwania plamek jodu i innych plamek sygnału barwnego.
- Do usuwania uporczywych zadrapań z wykładzin PCV i linoleum, takich jak te spowodowane przez kółka do łóżek.
- Do czyszczenia pasty cynkowej i bandaży gipsowych. Do usuwania pozostałości alginatu i cementu oraz drobinek tlenku cynku/ eugenolu.
- Rozpuszcza tłuste plamy na odzieży, dywanach i poduszkach.

### Stosowanie

Nałożyć **ORANGE SOLVENT** na chusteczkę lub jednorazową ściereczkę i przetrzeć czyszczony obszar.

### Uwagi dotyczące stosowania

Kompatybilność materiałowa nie jest gwarantowana dla wszystkich polimerów, w szczególności amorficznych termoplastów, takich jak akryl lub poliwęglany. Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić kompatybilność na dyskretnym miejscu.

### Skład

Ekstrakt ze skórki Citrus Sinensis, limonen, oleinian decylu.

### Opinie ekspertów

Posiadamy obszerne raporty ekspertów dotyczące wszystkich naszych produktów. Na życzenie z przyjemnością dostarczymy Państwu portfolio raportów eksperckich.

### Zwroty wskazujące środki ostrożności i zagrożenia

Łatwopalna ciecz i opary. Powoduje podrażnienie skóry. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Połknięcie i dostanie się do dróg oddechowych może

powodować poważne skutki. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy mieć pod ręką opakowanie lub etykietę produktu. Trzymać poza zasięgiem dzieci. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskiei, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Zakaz palenia. Nosić rękawice ochronne/ odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. NIE wywoływać wymiotów. W PRZYPADKU ZNACZENIA SKÓRY (lub włosów): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłucz skórę wodą/prysznicem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Unikaj uwolnienia do środowiska. Zawartość/pojemnik usuwać do zatwierdzonej firmy zajmującej się utylizacją lub lokalnej zbiórki.

Tylko do użytku profesjonalnego.



Produkt	Pojed.opakowanie	Zawartość	Opak. zb.	REF
ORANGE SOLVENT	Butelka	250ml	9	00-805-0025EXP
	Butelka	500ml	6	00-805-005EXP



Dr. Schumacher

Dr. Schumacher GmbH

Am Roggenfeld 3 · 34323 Malsfeld · Germany · T +49 5664 9496-0 · info@schumacher-online.com

www.schumacher-online.com

Dr. Schumacher Sp. z o.o.

Jeleniogórska 12 · 59-800 Lubań · Polska · T +48 734 183 876 · sales-poland@schumacher-online.pl

