



# Chlor-Clean Wipes


**Inkrustowane chlorem suche chusteczki do mycia i dezynfekcji różnego rodzaju powierzchni, wyposażenia, miejsc zanieczyszczonych organicznie oraz usuwania plam krwi.**

- działanie biobójcze przeciwko: *C.difficile*, *C.difficile* O27, *C.sporogenes*, *C.perfringens*, *B.subtilis*, *B.cereus*
- idealne do dezaktywacji zanieczyszczeń organicznych
- przebadane wg normy EN 16615 oraz EN 17126
- doskonałe właściwości myjące
- długi okres przydatności do użycia

Preparat do użytku profesjonalnego.  
Produkt biobójczy - pozwolenie  
nr 6741/16 (Kat. I, gr. 2)

# Chlor-Clean Wipes

**Inkrustowane chlorem suche chusteczki do mycia i dezynfekcji różnego rodzaju powierzchni, wyposażenia, miejsc zanieczyszczonych organicznie oraz usuwania plam krwi.**

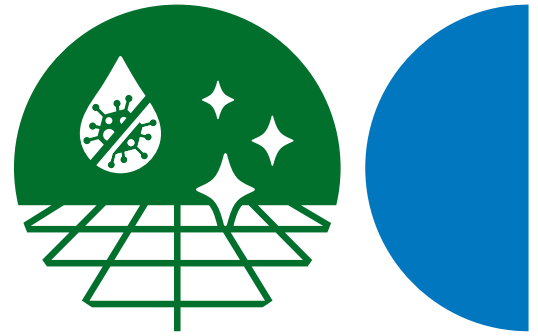

## PODSTAWOWE CECHY

- wykazują szerokie spektrum biobójcze: bakterio-, drożdżako-, grzybo- i prątkobójcze oraz działanie wirusobójcze (Polio, Adeno, Noro) i sporobójcze (C.difficile, C.difficile O27, C.sporogenes, C.perfringens, B.subtilis, B.cereus) potwierdzone badaniami
- dodatkowo przebadane zgodnie z normą EN 16615 i EN 17126
- 1 chusteczka uwalnia aż 10 000 ppm
- doskonałe właściwości myjące dzięki zawartości tenzydów myjących
- zalecane do dezaktywacji plam krwi, wydzielin, wydalin oraz innych zabrudzeń organicznych
- wygodne i łatwe w użyciu – inkrustowana chlorem chusteczka jest aktywowana jedynie poprzez nasączenie jej zimną wodą
- szczególnie zalecane do stosowania w miejscach, w których obowiązuje bardzo wysoki reżim sanitarny oraz w sytuacjach zagrożenia epidemicznego
- wysoka jakość włókniny i optymalny wymiar chusteczki (60 g/m<sup>2</sup>, 19 cm x 24 cm)
- długi okres przydatności do użycia – 24 miesiące

## INSTRUKCJA UŻYCIA

Preparat do użytku profesjonalnego.  
Przed użyciem zawsze wkładać rękawice i fartuch.  
Zapewnić dostateczną wentylację w pomieszczeniu.

## SKŁAD CHEMICZNY

### 100 g płynu zawiera:

substancja czynna – Troklozen sodu  
(sól sodowa kwasu dichloroizocyjanurowego  
CAS 2893-78-9) – 96 g; dodatek detergentu:  
sole sodowe kwasów sulfonowych < 3%

## SKUTECZNOŚĆ BIOBÓJCZA

### Chusteczki wykazują działanie:

- bakteriobójcze (w tym MRSA), prątkobójcze, grzybobójcze w warunkach brudnych – 15 min.
- sporobójcze przeciwko: – B.cereus, C.difficile (warunki brudne) – 2 min., C.difficile O27, C.perfringens, B.subtilis (warunki czyste) – 15 min.
- C.sporogenes (warunki czyste i brudne) – 60 min.
- wirusobójcze (warunki brudne) wobec Polio, Adeno i Noro – 5 min.

Dodatkowe działanie bakterio- i drożdżakobójcze wg EN 16615:2015: 5 min. (warunki brudne).

## OPAKOWANIA

Chlor-Clean Wipes – opakowanie flow-pack  
– 25 szt. chusteczek

### ogólna dezynfekcja powierzchni

Wyciągnij chusteczkę  
i zamknij opakowanie.



Upewnij się, że z kranu płynie zimna woda,  
po czym środek chusteczki nasączaj  
zimną wodą przez jedną,  
bądź dwie sekundy.



Wyciśnij chusteczkę nad zlewem  
w celu usunięcia nadmiaru wody  
(upewnij się, że został wyciśnięty  
nadmiar wody).



Umyj i zdezynfekuj powierzchnię przy  
użyciu chusteczki. Pozostaw powierzchnię  
zwilżoną, ale nie moką. W celu osiągnięcia  
pożądanego spektrum biobójczego,  
odczekać zalecany czas ekspozycji  
(od 5 do 15 minut).



### dezynfekcja miejsc zanieczyszczonych organicznie i usuwanie plam krwi

Wyciągnij chusteczkę i zamknij  
opakowanie.



W przypadku większych plam możesz  
potrzebować kilku chusteczek.

Położ chusteczkę/ki bezpośrednio na  
plamę i poczekaj, aż się wchłonie.



Użyj kolejnej chusteczki nasączonej  
wodą zgodnie z ww. instrukcją użycia,  
celem ostatecznego umycia  
i zdezynfekowania powierzchni.



Usuń wszystkie zużyte chusteczki  
jako odpad medyczny.



**Produkt biobójczy należy stosować z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.**

## PARTNER STRATEGICZNY I DYSTRYBUTOR W POLSCE:

**MEDILAB Firma Wytwórczo Usługowa Sp. z o.o.**  
ul. Niedźwiedzia 60 • 15-531 Białystok • Polska  
T: 085 747 93 00 • F: 085 747 93 01

## WYTWÓRCA:

**Guest Medical Limited**  
Unit A6, Larkfield Trading Estate  
Aylesford, Kent. UK. ME20 6SW  
Wielka Brytania  
[www.guest-medical.co.uk](http://www.guest-medical.co.uk)

Ulotka informacyjna – opracowanie Medilab Sp. z o.o. 2109-02



[medilab.pl](http://medilab.pl)