

ODKRYJ NOWĄ SYNERGIĘ DLA TWOJEJ CENTRALNEJ STERYLIZATORNI 5 ENZYMÓW W JEDNYM WYJĄTKOWYM PRODUKCIE

Aniosyme Synergy 5

UNIKALNY 5-ENZYMATYCZNY PREPARAT MYJĄCY DO MANUALNEGO I AUTOMATYCZNEGO REPROCESOWANIA NARZĘDZI

Aniosyme Synergy 5 to pierwszy, pięcioenzymatyczny preparat myjący o szerokim zastosowaniu. Posiada doskonałe właściwości myjące zarówno w przypadku manualnego, jak i maszynowego mycia narzędzi, umożliwiając stosowanie jednego produktu w Centralnej Sterylizatorni:

Aniosyme Synergy 5:

- **UNIKALNY** - 5-enzymatyczny preparat myjący o szerokim spektrum działania
- **PEWNY** - szybkie działanie w myjniach-dezynfektorach, niezależnie od jakości użytej wody - już w 5 minut
- **SYNERGICZNY** - pierwszy preparat do manualnego i automatycznego mycia narzędzi w Centralnej Sterylizatorni



Aniosyme Synergy 5

Unikalny 5-enzymatyczny preparat myjący do manualnego i automatycznego reprocessowania narzędzi



Aniosyme Synergy 5
Manualne przygotowanie
4 x 5 l kanister + pompka 25 ml
Kod produktu: 3091540



Aniosyme Synergy 5
Maszynowe przygotowanie
2 x 5 l kanister
Kod produktu: 3091520

SKUTECZNY

Udowodnione działanie już po upływie 5 minut, w połączeniu z doskonałą kompatybilnością materiałową.

ENZYMATYCZNY

Usuwa wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia organiczne dzięki specjalnie opracowanej formule zawierającej pięć enzymów.

PEWNY

Niskie stężenia roztworu wynoszące od 0,1% do 0,5% zapewniają doskonałą skuteczność mycia.

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

| | | |
|--|------|-------------------|
| • Gęstość | 20°C | 1,10 g/ml |
| • Wartość pH* (koncentrat) | 20°C | 7,89 |
| • Wartość pH* (roztwór, 1 - 5 ml/l) | 20°C | 6,89 - 7,29 |
| • Przewodność | 20°C | 0,08 - 0,33 mS/cm |
| (roztwór, 1 - 5 ml/l w wodzie demineralizowanej) | | |

*pomiarów wartości pH w warunkach eksploatacji należy zawsze dokonywać przy użyciu pehametru z kompensacją temperatury.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

| REKOMENDOWANE DO STOSOWANIA MANUALNEGO I W MYJNI ULTRADŹWIĘKOWEJ | ILOŚĆ | KOD PRODUKTU |
|--|---------------------------------|--------------|
| Aniosyme Synergy 5 | 12 x 1 l butelka | 3100460 |
| Aniosyme Synergy 5 | 4 x 5 l kanister + pompka 25 ml | 3091540 |

| REKOMENDOWANE DO STOSOWANIA W MYJNI-DEZYNFEKTORZE | ILOŚĆ | KOD PRODUKTU |
|---|-------------------|--------------|
| Aniosyme Synergy 5 | 2 x 5 l kanister | 3091520 |
| Aniosyme Synergy 5 | 1 x 10 l kanister | 3094300 |



LABORATOIRES ANIOS
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

Dystrybutor:
ECOLAB SP. Z O.O.
ul. Opolska 114
31-323 Kraków
Polska

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

5-enzymatyczny preparat do mycia narzędzi. Mycie sprzętu chirurgicznego i medycznego, endoskopów i wyrobów medycznych poprzez zanurzenie, w myjkach ultradźwiękowych, w myjniach-dezynfektorach i myjniach tunelowych.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA

Manulne przygotowanie

- Koncentrat do zastosowania profesjonalnego
- Stosować w stężeniu od 0,5% do 2%
- Skuteczny w ciągu 5 minut
- Należy dostosować stężenie, czas działania i temperaturę wody do poziomu zabrudzenia. W razie konieczności użyć szczotki. Dokładnie spłukać
- Maksymalna temperatura: 35°C

Maszynowe przygotowanie

- Koncentrat do zastosowania profesjonalnego
- Stosować w stężeniu od 0,1% do 0,5%
- Skuteczny w ciągu 5 minut
- Należy dostosować stężenie, czas działania i temperaturę wody do poziomu zabrudzenia. Dokładnie spłukać
- Maksymalna temperatura: 60°C

SKŁAD

Niejonowe i kationowe środki powierzchniowo-czynne, związki kompleksujące, stabilizator, enzymatyczne substancje pomocnicze.

PRZECHOWYWANIE

Niebezpieczeństwo - należy przestrzegać środków ostrożności (sporządzonych na podstawie obowiązujących przepisów UE w zakresie klasyfikacji i oznakowania produktów chemicznych). Przechowywać w temperaturze od +5°C do +25°C.

DOKUMENTACJA

Dokumentacja dostępna na życzenie.

WYROBÓW MEDYCZNYCH UŻYWAJ BEZPIECZNIE

Należy zapoznać się z informacją umieszczoną na etykiecie produktu.



WYŁĄCZNIE DO ZASTOSOWANIA PROFESJONALNEGO.



www.ecolab.pl