



Gotowe do użycia chusteczki dezynfekcyjne o działaniu sporobójczym (w tym *Clostridium difficile*) na bazie kwasu nadoctowego do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych inwazyjnych i nieinwazyjnych

## mikroqid® PAA wipes chusteczki

### Zalety

- skuteczność wobec bakterii (Tbc), grzybów, wirusów: adeno i polio oraz spor (w tym *Clostridium difficile*, *Bacillus subtilis*)
- gotowy do użycia
- nie wymaga aktywacji
- możliwość stosowania w dezynfekcji sond TEE (echokardiografii przezprzełykowej)

### Obszary zastosowania

Produkt mikroqid®PAA wipes dzięki szerokiemu spektrum działania i krótkiemu czasowi oddziaływania jest idealnym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie istnieje wysokie ryzyko namnażania drobnoustrojów chorobotwórczych, np.: izolatki, sale operacyjne, oddziały intensywnej opieki medycznej, oddziały neonatologiczne, "brudne" sektory w obrębie centralnej sterylizatorni i pracownie endoskopowe. Preparat do dezynfekcji w obszarach wysokiego ryzyka w tym ognisk *C. difficile*. Chusteczki przeznaczone są do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych (w tym inkubatorów). Ze względu na szerokie spektrum działania oraz doskonałą tolerancję materiałową chusteczki mikroqid®PAA wipes mogą być stosowane do dezynfekcji powierzchni bezkanałowych wyrobów medycznych takich jak:

- sondy do przezprzełykowej echokardiografii (TEE)
- wzierniki nosowo-gardłowe (otorynolaryngologia),
- sondy ultradźwiękowe

Chusteczki dostępne są w rozmiarze 20cm x 30cm.  
Trwałość od chwili otwarcia opakowania: 28 dni.

### Właściwości produktu

Chusteczki mikroqid®PAA wipes działają bakteriobójczo, grzybobójczo, bójczo wobec prątków gruźlicy, sporobójczo (w tym wobec *Clostridium difficile* i *Bacillus subtilis*) oraz wirusobójczo wobec wirusa polyoma SV40, adenowirusa, norowirusa i wirusa polio.

### Wskazówki dotyczące stosowania

Powierzchnię wyrobu medycznego należy dokładnie przetrzeć chusteczką, a następnie pozostawić do wyschnięcia. Przed użyciem mikroqid®PAA wipes należy upewnić się, że z powierzchni usunięte zostały wszelkie widoczne zabrudzenia.

CE 0297



## Dane produktu

100 g preparatu dezynfekcyjnego, którym nasączone są chusteczki zawiera: 0,06% kwas nadoctowy oraz nadtlenek wodoru i kwas octowy.

### Dane chemiczno-fizyczne

Forma	Roztwór wodny na włókninie
Gęstość	ok. 1,02 g/cm <sup>3</sup> / 20 °C / dla aktywnego roztworu
Kolor	bezbarwny
pH	ok. 2,2 / 20 °C / dla aktywnego roztworu
Tarcie, dynamiczne	Brak dostępnych danych
Temperatura zapłonu	Nie dotyczy

## Wskazówki szczególne

Środki dezynfekcyjne należy stosować z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Przed każdorazowym użyciem należy zapoznać się z oznakowaniem i informacją o produkcie. Chronić przed działaniem wysokich temperatur i promieni słonecznych. Produkt mikrozid<sup>®</sup>PAA wipes nie nadaje się do stosowania na powierzchniach wykonanych z mosiądzu, miedzi, aluminium, a także na powierzchniach chromowanych. Należy przestrzegać uwag producenta odnośnie powierzchni poddawanych działaniu preparatu, a w razie potrzeby należy potwierdzić tolerancję materiałową przed zastosowaniem produktu. Nie używać po upływie terminu ważności.

Termin ważności: 1 rok

## Informacje dotyczące zamówienia

Artykuł	Forma dostawy	Art.-Nr.
MIKROZID PAA WIPES chust. 50ST DS	10/Karton	128101

## Informacje dotyczące ochrony środowiska

Produkty firmy Schülke & Mayr GmbH wytwarzane są według nowoczesnych i bezpiecznych technologii z zachowaniem dbałości o ochronę środowiska, zasad ekonomicznych i wysokich standardów jakości.

## Badania i informacje

Dopuszczenia producentów:

- sondy TEE firmy Phillips
- głowice ultradźwiękowe firmy Phillips
- endoskopy firmy Karl Storz

Na życzenie dostarczymy niezbędne raporty dotyczące preparatu.



Schülke & Mayr GmbH posiada pozwolenie na wytwarzanie produktów leczniczych zgodnie z §13 ustawy o produktach leczniczych oraz posiada certyfikat GMP.

**Dystrybutor**  
Schülke Polska Sp. z o. o.  
Al. Jerozolimskie 132  
02-305 Warszawa, Polska  
Telefon +48 0 22 11-60-700  
Telefax +48 0 22 11-60-701  
www.schulke.pl  
schulke.polska@schuelke.com

**Wytwórca**  
Schülke & Mayr GmbH  
Robert-Koch-Str. 2  
22851 Norderstedt, Niemcy  
Telefon +49 40 - 52100 - 0  
+49 40 - 52100 - 318  
www.schuelke.com  
info@schuelke.com