

tabela dozowania

perform[®]

schülke -

stężenie	2%	2%
spektrum	bakteriobójczo drożdżakobójczo prątkobójczo wirusobójczo (BVDV, vaccinia, adeno, rota, polyoma SV40 noro, polio)	bakteriobójczo drożdżakobójczo prątkobójczo wirusobójczo (BVDV, vaccinia, adeno, rota, polyoma SV40 noro, polio) sporobójczo (C. difficile)
czas	15 min.	120 min.
litry roztworu	ilość granulatu	
2 litry	40 g	40 g
4 litry	80 g	80 g
8 litrów	160 g	160 g
10 litrów	200 g	200 g
20 litrów	400 g	400 g
30 litrów	600 g	600 g

Sposób przygotowania:

aby otrzymać 2 litry 2% roztworu dezynfekcyjnego należy do 1960 ml wody wodociągowej dodać 40 g granulatu i krótko zamieszać.

W wodzie o temperaturze powyżej 40°C roztwór traci aktywność mikrobiologiczną.