



Chlor-Clean Wipes


Inkrustowane chlorem suche chusteczki do mycia i dezynfekcji różnego rodzaju powierzchni, wyposażenia, miejsc zanieczyszczonych organicznie oraz usuwania plam krwi.

- działanie biobójcze przeciwko: *C.difficile*, *C.difficile* O27, *C.sporogenes*, *C.perfringens*, *B.subtilis*, *B.cereus*
- idealne do dezaktywacji zanieczyszczeń organicznych
- przebadane wg normy EN 16615 oraz EN 17126
- doskonałe właściwości myjące
- długi okres przydatności do użycia

Preparat do użytku profesjonalnego.
Produkt biobójczy - pozwolenie
nr 6741/16 (Kat. I, gr. 2)

Chlor-Clean Wipes

Inkrustowane chlorem suche chusteczki do mycia i dezynfekcji różnego rodzaju powierzchni, wyposażenia, miejsc zanieczyszczonych organicznie oraz usuwania plam krwi.

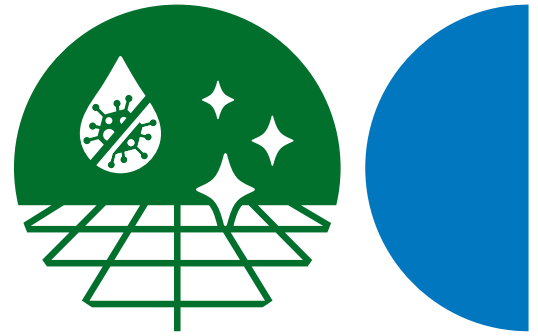

PODSTAWOWE CECHY

- wykazują szerokie spektrum biobójcze: bakterio-, drożdżako-, grzybo- i prątkobójcze oraz działanie wirusobójcze (Polio, Adeno, Noro) i sporobójcze (C.difficile, C.difficile O27, C.sporogenes, C.perfringens, B.subtilis, B.cereus) potwierdzone badaniami
- dodatkowo przebadane zgodnie z normą EN 16615 i EN 17126
- 1 chusteczka uwalnia aż 10 000 ppm
- doskonałe właściwości myjące dzięki zawartości tenzydów myjących
- zalecane do dezaktywacji plam krwi, wydzielin, wydaliny oraz innych zabrudzeń organicznych
- wygodne i łatwe w użyciu – inkrustowana chlorem chusteczka jest aktywowana jedynie poprzez nasączenie jej zimną wodą
- szczególnie zalecane do stosowania w miejscach, w których obowiązuje bardzo wysoki reżim sanitarny oraz w sytuacjach zagrożenia epidemicznego
- wysoka jakość włókniny i optymalny wymiar chusteczki (60 g/m², 19 cm x 24 cm)
- długi okres przydatności do użycia – 24 miesiące

INSTRUKCJA UŻYCIA

Preparat do użytku profesjonalnego.
Przed użyciem zawsze wkładać rękawice i fartuch.
Zapewnić dostateczną wentylację w pomieszczeniu.

SKŁAD CHEMICZNY

100 g płynu zawiera:

substancja czynna – Troklozen sodu
(sól sodowa kwasu dichloroizocyanurowego
CAS 2893-78-9) – 96 g; dodatek detergentu:
sole sodowe kwasów sulfonowych < 3%

SKUTECZNOŚĆ BIOBÓJCZA

Chusteczki wykazują działanie:

- bakteriobójcze (w tym MRSA), prątkobójcze, grzybobójcze w warunkach brudnych – 15 min.
- sporobójcze przeciwko: – B.cereus, C.difficile (warunki brudne) – 2 min., C.difficile O27, C.perfringens, B.subtilis (warunki czyste) – 15 min.
- C.sporogenes (warunki czyste i brudne) – 60 min.
- wirusobójcze (warunki brudne) wobec Polio, Adeno i Noro – 5 min.

Dodatkowe działanie bakterio- i drożdżakobójcze wg EN 16615:2015: 5 min. (warunki brudne).

OPAKOWANIA

Chlor-Clean Wipes – opakowanie flow-pack
– 25 szt. chusteczek

ogólna dezynfekcja powierzchni

Wyciągnij chusteczkę
i zamknij opakowanie.



Upewnij się, że z kranu płynie zimna woda,
po czym środek chusteczki nasączaj
zimną wodą przez jedną,
bądź dwie sekundy.



Wyciśnij chusteczkę nad zlewem
w celu usunięcia nadmiaru wody
(**upewnij się, że został wyciśnięty
nadmiar wody**).



Umyj i zdezynfekuj powierzchnię przy
użyciu chusteczki. Pozostaw powierzchnię
zwilżoną, ale nie moką. W celu osiągnięcia
pożądanego spektrum biobójczego,
odczekać zalecany czas ekspozycji
(od 5 do 15 minut).



dezynfekcja miejsc zanieczyszczonych organicznie i usuwanie plam krwi

Wyciągnij chusteczkę i zamknij
opakowanie.



W przypadku większych plam możesz
potrzebować kilku chusteczek.

Położ chusteczkę/ki bezpośrednio na
plamę i poczekaj, aż się wchłonie.



Użyj kolejnej chusteczki nasączonej
wodą zgodnie z ww. instrukcją użycia,
celem ostatecznego umycia
i zdezynfekowania powierzchni.



Usuń wszystkie zużyte chusteczki
jako odpad medyczny.



Produkt biobójczy należy stosować z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.

PARTNER STRATEGICZNY I DYSTRYBUTOR W POLSCE:

MEDILAB Firma Wytwórczo Usługowa Sp. z o.o.
ul. Niedźwiedzia 60 • 15-531 Białystok • Polska
T: 085 747 93 00 • F: 085 747 93 01

WYTWÓRCA:

Guest Medical Limited
Unit A6, Larkfield Trading Estate
Aylesford, Kent. UK. ME20 6SW
Wielka Brytania
www.guest-medical.co.uk

Ulotka informacyjna – opracowanie Medilab Sp. z o.o. 2109-02



medilab.pl