

INSTRUKCJA UŻYCIA


varian









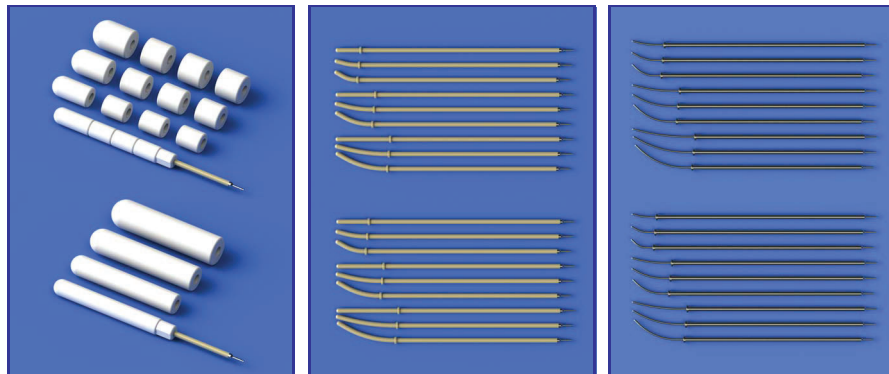


Zestaw uniwersalnego segmentowego
aplikatora cylindrycznego GM11011100

Zestaw uniwersalnego aplikatora kikuta pochwy GM11011160

Zestaw uniwersalnych sond szyjki macicy GM11011500 - 1700

Zestawy uniwersalnych tytanowych sond szyjki macicy GM11013100 - 3200



Lista komponentów Zestaw uniwersalnego segmentowego aplikatora cylindrycznego											
Opis	Liczba	Nr produktu	Materiał	Wielokrotnego użytku	Czyszczenie ręczne	Czyszczenie maszynowe	Autoklaw	TK		MRI	
Segment przedniej końcówki, ø20 mm, długość 50 mm	1	GM11011090	PPSU	✓	500	500	✓	✓			
Segment przedniej końcówki, ø25 mm, długość 52,5 mm	1	GM11011080	PPSU	✓	500	500	✓	✓			
Segment przedniej końcówki, ø30 mm, długość 55 mm	1	GM11011070	PPSU	✓	500	500	✓	✓			
Segment przedniej końcówki, ø35 mm, długość 57,5 mm	1	GM11011060	PPSU	✓	500	500	✓	✓			
Segment cylindra, ø20 mm, długość 30 mm	3	GM11005070	PPSU	✓	500	500	✓	✓			
Segment cylindra, ø25 mm, długość 30 mm	3	GM11005100	PPSU	✓	500	500	✓	✓			
Segment cylindra, ø30 mm, długość 30 mm	3	GM11005130	PPSU	✓	500	500	✓	✓			
Segment cylindra, ø35 mm, długość 30 mm	3	GM11005160	PPSU	✓	500	500	✓	✓			
Szttywna rurka przewodnika, długość 250 mm	1	GM11011180	PEEK/Tytan	✓	500	500	✓	✓			
Segment zaciskowy	1	GM11005180	PPSU	✓	500	500	✓	✓			
Zatyczki stosowane podczas czyszczenia, ciemnoniebieskie (opakowanie 25 szt.)	4	GM11010770	Silikon	-	1	1	✓	✓			
Tabela 1.0 GM11011100											

INSTRUKCJA UŻYCIA






varian








Zestaw uniwersalnego segmentowego
aplikatora cylindrycznego GM11011100

Zestaw uniwersalnego aplikatora kikuta pochwy GM11011160

Zestaw uniwersalnych sond szyjki macicy GM11011500 - 1700

Zestawy uniwersalnych tytanowych sond szyjki macicy GM11013100 - 3200

Lista komponentów Zestaw aplikatora z uniwersalnymi końcówkami									
Opis	Liczba	Nr produktu	Materiał	Wielokrotnego użytku	Czyszczenie ręczne	Czyszczenie maszynowe	Autoklaw	TK	MRI
Cylinder, ø20 mm, długość 140 mm	1	GM11011120	PPSU	✓	500	500	✓	✓	
Cylinder, ø25 mm, długość 140 mm	1	GM11011130	PPSU	✓	500	500	✓	✓	
Cylinder, ø30 mm, długość 140 mm	1	GM11011140	PPSU	✓	500	500	✓	✓	
Cylinder, ø35 mm, długość 140 mm	1	GM11011150	PPSU	✓	500	500	✓	✓	
Sztywna rurka przewodnika, długość 250 mm	1	GM11011180	PEEK/Tytan	✓	500	500	✓	✓	
Segment zaciskowy	1	GM11005180	PPSU	✓	500	500	✓	✓	
Zatyczki stosowane podczas czyszczenia, ciemnoniebieskie (opakowanie 25 szt.)	4	GM11010770	Silikon	-	1	1	✓	✓	
Tabela 1.1 GM11011160									

Lista komponentów Zestawy uniwersalnych sond szyjki macicy (długości parzyste)									
Opis	Liczba	Nr produktu	Materiał	Wielokrotnego użytku	Czyszczenie ręczne	Czyszczenie maszynowe	Autoklaw	TK	MRI
Sonda aplikatora, ø6,3 mm x 320 mm, prosta, 40 mm	1	GM11011540	PEEK/FEP/ Tytan	✓	500	500	✓	✓	
Sonda aplikatora, ø6,3 mm x 320 mm, zakrzywienie 15°, 40 mm	1	GM11011550	PEEK/FEP/ Tytan	✓	500	500	✓	✓	
Sonda aplikatora, ø6,3 mm x 320 mm, zakrzywienie 30°, 40 mm	1	GM11011560	PEEK/FEP/ Tytan	✓	500	500	✓	✓	
Sonda aplikatora, ø6,3 mm x 320 mm, prosta, 60 mm	1	GM11011600	PEEK/FEP/ Tytan	✓	500	500	✓	✓	
Sonda aplikatora, ø6,3 mm x 320 mm, zakrzywienie 15°, 60 mm	1	GM11011610	PEEK/FEP/ Tytan	✓	500	500	✓	✓	
Sonda aplikatora, ø6,3 mm x 320 mm, zakrzywienie 30°, 60 mm	1	GM11011620	PEEK/FEP/ Tytan	✓	500	500	✓	✓	
Sonda aplikatora, ø6,3 mm x 320 mm, prosta, 80 mm	1	GM11011660	PEEK/FEP/ Tytan	✓	500	500	✓	✓	
Tabela 1.2 GM11011700									